

家庭用補助手すり

屋内専用

スタンバー Z

シリーズ
レイナ
Stanbar Reina
カンタ
Kanta
チコ
Chico

取扱説明書

- この説明書には下記のマークを付けています。
 拡大損害が予想される事項には・・・・・△
 禁止行為には・・・・・⊘
 特に良く読んで頂きたい事項には・・・・・!
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

このたびは、「スタンバー Zシリーズ」をお買い求めいただきありがとうございます。
 ご使用前にこの説明書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

型式 SBREシリーズ **Stanbar Reina**

【スタンバー-Reina (レイナ)】

この商品はソファ・ベッド・椅子などからの立ち上がりの際に置くだけで使用できる家庭用補助手すりです。



型式 SBZシリーズ **Stanbar Kanta**

【スタンバー-Kanta (カンタ)】


この商品は立ち上がりや座り込みの際に置くだけで使用できる家庭用補助手すりです。




型式 SBCシリーズ **Stanbar Chico**

【スタンバー-Chico (チコ)】

この商品は床からの立ち上がりの際に置くだけで使用できる家庭用補助手すりです。コンパクトで旅行などにも持参できます。

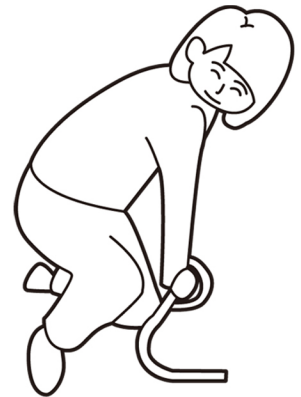

【各部の名称】

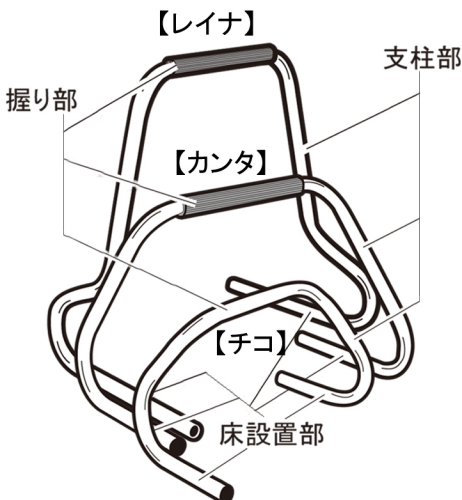

ご使用前に・・・

よく読んで正しく安全にご使用ください。

全シリーズ
耐荷重:

1150N (120kg)



警告 重大な事故の原因になります。

- 不安定な状態で無理に体重をかけない。転倒の原因となります。
- 浴室など滑りやすい場所では使用しない。



注意 ケガや本体損傷の原因になります。

- 火気の近くで使用や放置をしない。
- 本製品を引きずって運ばない。床や本製品に傷を付けるおそれがあります。



使用方法

お手入れ方法



警告 浴室など滑りやすい場所では使用しないでください。転倒の原因となります。

1. 床設置部を安定した床面に置きます。
2. スタンバーReina(レイナ)はスタンバー本体を掴みやすい位置に調整します。
 • スタンバーKanta(カンタ) スタンバーChico(チコ)はスタンバー本体を身体と平行に向き合うように調整します。
3. 握り部を両手でしっかり握ります。
4. ゆっくりと本体に体重をかけ、立ち上がり(座り)ます。

汚れが気になりましたら、かたくしぼった布で拭き取ってください。



しつこい汚れには、薄めた中性洗剤をご使用ください。



注意

シンナー・ベンジンなどは使用できません。



【スタンバーReina(レイナ)】

【スタンバーKanta(カンタ)】

【スタンバーChico(チコ)】



握り部をしっかり握ってください。

必ず、スタンバーの上から下に向かって体重をかけてください。



ゆっくり立ち上がります。

注意 転倒にご注意ください。



両手で握ってください。

握り部にバランスよく、均等に力をかけるようにします。

立つ時

座る時



注意 前後への転倒にご注意ください。



両手で握ってください。

握り部にバランスよく、均等に力をかけるようにします。



必ず、スタンバーの上から下に向かって体重をかけてください。



ゆっくり立ち上がります。

注意 前後への転倒にご注意ください。

保証規定

保証期間：お買上げ日より6ヶ月

この保証規定は、本書記載内容に基づく正常な使用において本体に不具合が発生した場合、お買上げ後の保証期間内であれば、無償で修理又は交換をお約束するものです。但し次の場合は期間内においても有償となります。

- (1) 本書記載以外の使用や禁止行為等に起因するもの。
- (2) 火災や地震等の災害によるもの。
- (3) お買上げ後の落下・輸送による損傷。
- (4) 使用による外観や本体各部の消耗及び損傷。
- (5) リサイクル業者や使用者等による再販、及び当社の責任範囲を超える場合等。
- (6) 当社以外による修理等。
- (7) 日本国外での使用。
- (8) 本書の提示のない場合。

※当社以外による修理・再販された製品については、保証期間内でも保証対象外です。

仕様

品名	スタンバーレイナ	スタンバーカンタ	スタンバーチコ
型式	SBREシリーズ	SBZシリーズ	SBCシリーズ
用途	家庭用補助手すり	家庭用補助手すり	家庭用補助手すり
材質	スチールパイプ エラストマー樹脂(握り部分) PE(エンドキャップ) 塩化ビニール(裏面滑り止めテープ) 焼付け塗装(色：ワインレッド、ダークブラウン)	スチールパイプ エラストマー樹脂(握り部分) PE(エンドキャップ) 塩化ビニール(裏面滑り止めテープ) 焼付け塗装(色：ワインレッド、メタリックブルー、ダークブラウン)	スチールパイプ PE(エンドキャップ) 塩化ビニール(裏面滑り止めテープ) 焼付け塗装(色：ワインレッド、ダークブラウン)
重量	約2.4kg	約1.9kg	約1.1kg
寸法	約(全幅)580 ×(奥行)415 ×(高さ)650mm	約(全幅)570 ×(奥行)350 ×(高さ)418mm	約(全幅)425 ×(奥行)230 ×(高さ)280mm
原産国	日本	日本	日本

※上記仕様などは改良のため、予告なく変更する場合があります。

2832019053000003
スタンバーレイナ

2832019053000001
スタンバーカンタ

2832019053000002
スタンバーチコ

発売元 ミライズ株式会社 URL : <http://merise-inc.com>

E-mail : info@e-tesuri.com

〒565-0834 大阪府吹田市五月が丘北1-17-203A

TEL : 06-6170-5161 FAX : 06-6170-5162

©PROCONSULTS06.2019 転記転用禁止