

小さく支える大きな未来 —ミライズ—




上がる・下がるを安全サポート

—屋外用—
1本脚手すり

アイレ


- ・ 日常に潜む危険な箇所に！
- ・ ちょっとした手がかりが大きな転倒事故を防ぎます！

【危険な日常】

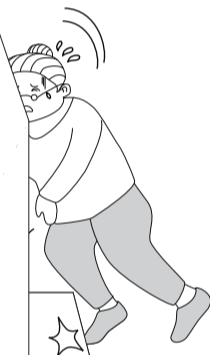

たった
一回の
転倒で

【普通の日常】

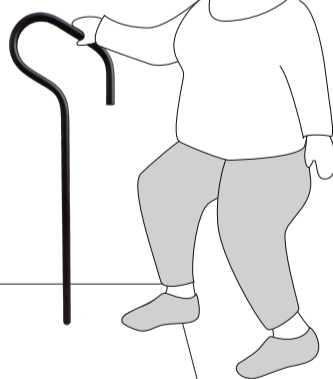

【危険な日常】



寝たきり
老後に
ならないで

【普通の日常】



寝たきりの原因、第3位が**転倒骨折**です！

長年、介護現場を直接見て考案した「1本脚手すり」一回の転倒事故で穏やかだった日常が変わってしまうそんな悲劇を減らしたい！その想いで設計しました。



大きな転倒事故を防ぎます!

玄関ポーチ 勝手口 庭への段差 など

20年に渡りバリアフリーの現場を渡り歩き耳にした生の声「ここにちょっと手がかりがあれば」「大げさな手すりは要らない」そこから生まれたのがワンポイント手すりの『アイレ』です。

【仕様】


品名：一本脚手すり アイレ
 型式：ARF-19
 JANコード：4560301640542
 用途：家庭用手すり
 材質：亜鉛メッキ鋼管（ポストジंक）、アクリル塗装（色：ダークブラウン）
 寸法：パイプ径φ31.8mm×奥行374mm×全高1200mm（施工前）
 支柱部分は二重パイプ構造
 耐荷重：1152N（122kg）
 希望小売価格：35,200円（税込・工事費別）
 原産国：日本
 保証期間：お買い上げ日より1年
 ※上記仕様などは改良のため、予告なく変更する場合があります。

【設置工事説明】

必要長さに応じて下部をカットして下さい。
 支柱部分は二重構造になっていますので、カットの際は
 インナーパイプも同時にカットして下さい。
 ※インナーパイプが外れた場合は強度保持のため必ず中に
 戻して下さい。インナーパイプは固定（接着）されていません。
注1：当製品は埋め込み専用です。アンカー等は使用しないでください。

【施工方法】

- ① コアドリルを用いて製品を埋め込む位置に穴をあけてください（φ52mm）
- ② 製品をモルタルで固定してください。当製品はインナーパイプ入りの二重構造になっています。強度保持のため必ず二重構造でご使用ください。

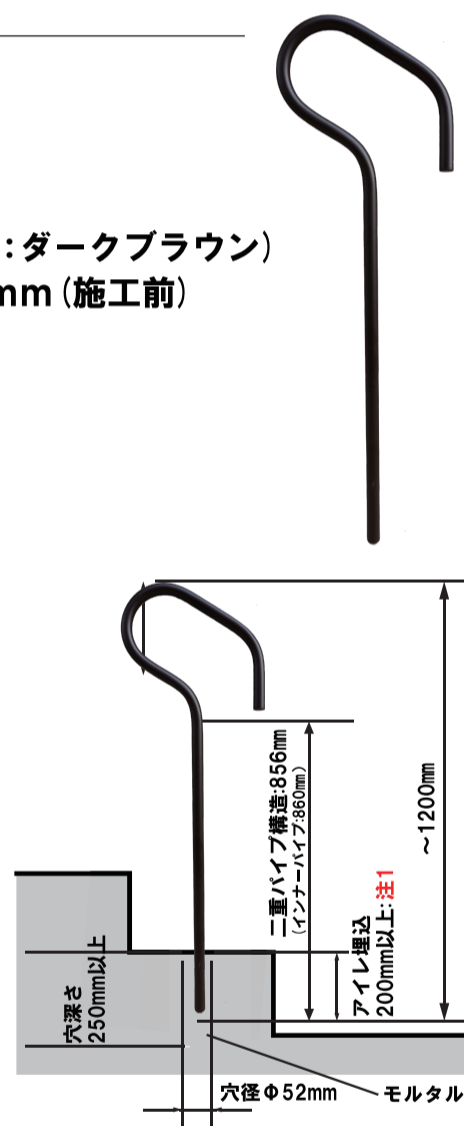

お電話でお申し込みの方

06-6170-5161

ミライズ 手すり

検索

■受付時間：月～金（平日）10：30～14：30

<https://www.merise-inc.com>

福祉介護機器・健康器具の企画・開発・製造・販売



ミライズ株式会社

〒565-0834 大阪府吹田市五月が丘北 1-17-203A

オンラインショップ「フレイルショップ」：<https://frailshop.com>